

103 | ClipCap-DT | Gebrauchsanweisung / Instructions for Use

Produkt / Product

Produktname/ Product name: ClipCap-DT


Produktreferenz / product reference: 103

Nutzung / Use

Zum Aufsetzen auf den Kopf zum Schutz des Haars vor nicht toxischem Schmutz. Schützt den Träger vor oberflächlichen mechanischen Verletzungen; insbesondere vor dem Verwickeln der Haare in unmittelbarer Arbeitsumgebung des Trägers. Auch geeignet zum Produktschutz.

To be placed on the head to protect the hair from non-toxic dirt. Protects the wearer from superficial mechanical injuries; especially from tangling of the hair in the wearer's immediate working environment. Also suitable for product protection.

Aufsetzanleitung / Fitting Instructions

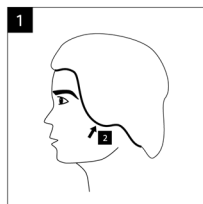

1. Haube über Haupthaar und Ohren ziehen.
 2. Sicherstellen, dass alle Haare sich unter Haube befinden.
1. Pull the cap over the hair and ears.
 2. Make sure all hair is covered by the hood.

Produkt vor Anwendung auf Schäden prüfen. Bei Beschädigung neues Produkt benutzen.

Check product for damage before use. If damaged, use new product.

Reinigung, Wartung, Überprüfung und Desinfizierung / Cleaning, maintenance, inspection and disinfection

Nicht erforderlich, da Einwegprodukt.

Not required, as it is a disposable product.

Lagerung und Haltbarkeit / Storage and shelf life

In Originalverpackung, an einem trockenen und dunklen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung, bei ca. -10°C bis 40°C Raumtemperatur. Lagerdauer von 10 Jahren ab Herstellung unter Einhaltung der Lagerbedingungen.

In original packaging, in a dry and dark place, without direct sunlight, at approx. -10°C to 40°C room temperature. Storage period of 10 years from production under compliance with storage conditions.

Entsorgung / Disposal

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Produkt im Hausmüll und auf Deponien entsorgt und thermisch verwertet werden, ohne dass giftige Stoffe freigesetzt werden. National geltende Bestimmungen und Gesetze sind zu befolgen.

When used as intended, the product can be disposed of in household waste and landfills and thermally recycled without releasing toxic substances. Nationally applicable regulations and laws must be followed.

Zweckbestimmung und Risiko, vor dem die PSA schützen soll / Intended purpose and risk against which the PPE is intended to protect

Schützt den Träger vor oberflächlichen mechanischen Verletzungen; insbesondere vor dem Verwickeln der Haare in unmittelbarer Arbeitsumgebung des Trägers. Entspricht den Anforderungen der Kategorie I der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

Protects the wearer from superficial mechanical injuries; especially from tangling of the hair in the wearer's immediate working environment. Complies with the requirements of Category I of the PPE Regulation (EU) 2016/425.

103 | ClipCap-DT | Gebrauchsanweisung / Instructions for Use

Schutzklassen und Verwendungsgrenzen / Classes of protection and corresponding limits of use

Das Produkt hat keine Schutzklasse. Schützt nicht vor gesundheitsgefährdenden Stoffen oder schädlichen biologischen Agenzien.

The product has no protection class. Does not protect against substances hazardous to health or harmful biological agents.

Fundstelle der vorliegenden Verordnung und der verwendeten einschlägigen harmonisierten Norm / Reference to this Regulation and relevant harmonized standards

Dieses Produkt entspricht den harmonisierten Normen gemäß der Verordnung (EU) 2016/425.

This product complies with the harmonized standards according to Regulation (EU) 2016/425.

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity



<https://dach-germany.de/downloads>

Hersteller / Manufacturer

DACH Schutzbekleidung GmbH Co. KG
Rotackerstr. 21, 76437 Rastatt, Germany