

Gebrauchsanweisung / Instructions for Use

Produkt / Product

Produktname: PE-Besucherkittel
Product name: PE-Visitor Gown


Produktreferenz / product reference: 491W

Nutzung / Use

Zur Nutzung als Schutzkittel vor nicht toxischem Schmutz und anderen minimalen Risikoanwendungen. Zum Anziehen über Bereichs-/Arbeitskleidung um Verunreinigung zu verhindern.

For use as a protective gown from non-toxic dirt and other minimal risk applications. To be worn over area/work clothing to prevent contamination.

Anziehenanleitung / Fitting Instructions

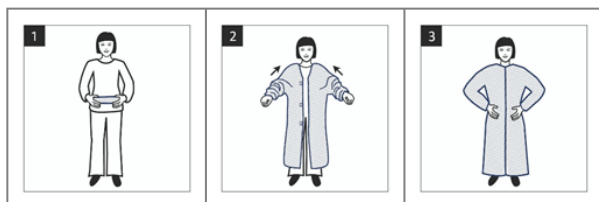

1. Einwegmantel mit sauberen Händen entnehmen.
 2. In die Ärmel schlüpfen und Einwegmantel über die Schultern ziehen.
 3. Einwegmantel vorne verschließen.
1. Take the gown out of the bag with clean hands.
 2. Slip into sleeves and pull gown over shoulders.
 3. Close the gown in the front.

Produkt vor Anwendung auf Schäden prüfen. Bei Beschädigung neues Produkt benutzen.

Check product for damage before use. If damaged, use new product.

Reinigung, Wartung, Überprüfung und Desinfizierung / Cleaning, maintenance, inspection and disinfection

Nicht erforderlich, da Einwegprodukt.

Not required, as it is a disposable product.

Lagerung und Haltbarkeit / Storage and shelf life

In Originalverpackung, an einem trockenen und dunklen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung, bei ca. -10°C bis 40°C Raumtemperatur. Lagerdauer von 10 Jahren ab Herstellung unter Einhaltung der Lagerbedingungen.

In original packaging, in a dry and dark place, without direct sunlight, at approx. -10°C to 40°C room temperature. Storage period of 10 years from production under compliance with storage conditions.

Entsorgung / Disposal

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Produkt im Hausmüll und auf Deponien entsorgt und thermisch verwertet werden, ohne dass giftige Stoffe freigesetzt werden. National geltende Bestimmungen und Gesetze sind zu befolgen.

When used as intended, the product can be disposed of in household waste and landfills and thermally recycled without releasing toxic substances. Nationally applicable regulations and laws must be followed.

Zweckbestimmung und Risiko, vor dem die PSA schützen soll / Intended purpose and risk against which the PPE is intended to protect

Der Kittel ist bestimmt zum Tragen über der sonstigen (Arbeits-)kleidung und dient dem Träger zum Schutz vor nicht toxischem Schmutz schwach aggressiven Reinigungsmitteln und Flüssigkeitsspritzern.

Der Kittel erfüllt die Anforderungen der Kategorie I der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

The gown is designed to be worn over other (work) clothing and serves to protect the wearer from non-toxic dirt, weakly aggressive cleaning agents and splashes of fluid.

The gown complies with the requirements of Category I of the PPE Regulation (EU) 2016/425.

Gebrauchsanweisung / *Instructions for Use*

Schutzklassen und Verwendungsgrenzen / *Classes of protection and corresponding limits of use*

Das Produkt hat keine Schutzklasse. Schützt nicht vor gesundheitsgefährdenden Stoffen oder schädlichen biologischen Agenzien.

The product has no protection class. Does not protect against substances hazardous to health or harmful biological agents.

Fundstelle der vorliegenden Verordnung und der verwendeten einschlägigen harmonisierten Norm / *Reference to this Regulation and relevant harmonized standards*

Dieses Produkt entspricht den harmonisierten Normen gemäß der Verordnung (EU) 2016/425.

This product complies with the harmonized standards according to Regulation (EU) 2016/425.

EU-Konformitätserklärung / *EU Declaration of Conformity*



<https://dach-germany.de/downloads>

Hersteller / *Manufacturer*

DACH Schutzbekleidung GmbH Co. KG
Rotackerstr. 2176437 Rastatt, Germany