

Produkt:	Neolution®Air		 	
REF:	256V			
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG			
Klassifizierung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kategorie III nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 			
Schutzklasse:	<p>Partikelfiltrierende Halbmaske FFP3 NR D nach EN 149:2001+A1:2009.</p> <p>Sehr gute Hautverträglichkeit wissenschaftlich belegt durch Prüfungen nach EN ISO 10993-5 (Zytotoxizität), EN ISO 10993-10 (Sensibilisierung) und EN ISO 10993-23 (Irritation): Die verwendeten Materialien sind nicht zytotoxisch, nicht sensibilisierend und nicht irritierend.</p>			
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maskenkörper: Vliesstoff aus Polypropylen ▪ Kopfband: Textiles Gummiband aus Polyester und Elasthan, frei von Naturlatex ▪ Nasenbügel: mit Plastik ummantelter Metalldraht ▪ Ventil: Polypropylen 			
Produktbeschreibung:	<p>Die dreiteilige Atemschutzmaske Neolution®Air besteht durch hochwertige Materialien, die dem Träger maximalen Tragekomfort garantieren. High-Tech-Filtermaterial generiert eine hohe Filterleistung gegen feste und flüssige Aerosole bei extrem niedrigem Atemwiderstand.</p> <p>Durch die drei beweglichen Teile folgt die Maske den Kieferbewegungen beim Sprechen. Dadurch wird ein konstanter Dichtsitz erreicht.</p> <p>Textile Kopfbänder sorgen für einen sicheren Halt der Maske am Gesicht. Die Bänder liegen angenehm am Kopf, ohne zu drücken oder an den Haaren zu ziehen.</p> <p>Maximaler Schutz auch unter extremen Bedingungen: für Einwegmasken freiwilliger Dolomitstaub-Einspeichertest bestanden!</p>			
Produktleistungen:	<p><i>Produktperformance nach EN 149:2001+A1:2009</i></p>			
	<p>Filtereffizienz</p>			
	Klasse	Anforderung	Testresultat	
		Maximaler Durchlass	Tatsächlicher Durchlass	
		NaCl 95 l/min	NaCl 95 l/min	Paraffinöl 95 l/min
		Paraffinöl 95 l/min	Paraffinöl 95 l/min	NaCl 95 l/min

	FFP3 NR D	1 %	1 %	0,07 %	0,16 %	
Atemwiderstand						
Klasse	Anforderung			Testresultat		
	Maximaler Atemwiderstand (mbar)			Tatsächlicher Atemwiderstand (mbar)		
	Einatmung		Ausatmung	Einatmung		Ausatmung
	30 l/min	95 l/min	160 l/min	30 l/min	95 l/min	160 l/min
	FFP3 NR D	1,0	3,0	3,0	0,4	1,6
Leckageprüfung						
Klasse	Anforderung			Testresultat		
	Maximale Gesamte nach innen gerichtete Leckage (%)	Minimum Schutzfaktor (Fit-Faktor)		Gesamte nach innen gerichtete Leckage (%) ¹		Schutzfaktor (Fit-Faktor) ^{1,2}
FFP3 NR D	2	30		0,88		113,6
<p>¹ Die Werte der Leckage und des Schutzfaktors wurden mit 3 Probanden unter Laborbedingungen als Mittelwert ermittelt und dienen nur als Referenz. Die Angaben repräsentieren nicht die reale Leckage einer Person am Arbeitsplatz und ersetzen keinen individuellen Fit-Test. ² Der Fit-Faktor (Schutzfaktor) gibt das Verhältnis zwischen der Partikelkonzentration außerhalb der Maske und der Partikelkonzentration innerhalb der Maske an.</p>						
Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft						
Klasse	Anforderung (max.)			Testresultat		
FFP3 NR D	1 %			0,56 %		
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge			GTIN	
	Box	20 Stk.			4049825006596	
	Karton	120 Stk.			4049825506584	
	Palette	5760 Stk.				
REF:	256V					
Farbe:	Weiß					
Anwendung:	Zum Einmalgebrauch. Lesen Sie die Gebrauchsinformationen vor der Benutzung.					

Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern (siehe Verpackung). Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt).
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.