

Produkt:	MediClassic Excel	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	2101	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	Klasse I, auf Basis der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 MDR, Anhang VIII; UMDNS Code: 12-458.
Schutzklasse:	Typ II R (flüssigkeitsresistent), geprüft nach EN 14683:2019 für medizinische Gesichtsmasken.
Produktbeschreibung:	Latexfreie, hochwertige, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Innen- und Außenseite besteht aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies, das Filtermedium besteht aus speziellem, im Meltblown-Verfahren hergestelltem Mikrofaservlies, zusammengeschnitten im Ultraschallverfahren. Entspricht dem HACCP Konzept.

Produktleistungen:	Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019			
	Prüfung	Leistungsklasse	Anforderung	Testresultat
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	99,9
	Druckdifferenz (Pa/cm²)		< 60	55
	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)		≥ 16,0	16
	Mikrobiologische Reinheit (CFU/g)		≤ 30	≤ 19,4
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Kontraindikationen.			
Farben:	Grün, Blau			

Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Spenderbox	50 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
GTIN:	2101B	4049825002338
	2101G	4049825000150
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Entsprechen der biologischen Kompatibilität ISO 10993. Mit dem Tragen der Maske schützt der Träger sein Umfeld.	
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	
Hinweise:	Nicht steril. 	