

Gebrauchsanweisung / *Instructions for Use*

Hersteller: DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

Produkt: Medizinische Gesichtsmaske

Produktname: MediClassic Splash

Produktreferenz: 209

Kategorisierung: Medizinprodukt Klasse I nach der Verordnung (EU) 2017/745. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 14683:2019+AC:2019 für medizinische Gesichtsmasken sowie die biologische Beurteilung von Medizinprodukten nach EN ISO 10993.

VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Untersuchen Sie die Maske einschließlich aller Bestandteile vor dem Gebrauch auf Löcher, Risse oder Schäden. Sollte eine Beschädigung festgestellt werden, verwenden Sie die Maske NICHT.

ANZIEHANLEITUNG:

1. Waschen Sie sich vor dem Berühren der Maske die Hände mit Wasser und Seife oder reinigen Sie Ihre Hände mit einem alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel.
2. Ziehen Sie die Schutzfolien auf Vorder- und Rückseite des Visieres mit Hilfe der farblich markierten Abziehhilfen am linken und rechten Rand ab.
3. Halten Sie die Maske vor Ihr Gesicht: die farbige Seite zeigt nach außen und der Rand mit dem Nasendraht nach oben.
4. Nehmen Sie die Bindebänder am oberen Rand der Maske auf und verknoten Sie sie am Hinterkopf. Biegen Sie den Nasenbügel mit beiden Händen um die Nase, um einen guten Sitz im Gesicht zu erreichen.
5. Während Sie die Maske mit einer Hand festhalten, ziehen Sie den unteren Teil der Maske unter Ihr Kinn, um die Falten der Maske auseinanderzuziehen. Die Maske sollte nun Ihre Nase, Ihren Mund und Ihren Kiefer vollständig bedecken.
6. Nehmen Sie die Bindebänder am unteren Rand der Maske auf und verknoten Sie sie im Nacken.

WICHTIG: Berühren Sie nicht die kontaminierte Außenseite der Maske während oder nach dem Gebrauch. Öffnen Sie zuerst die unteren, dann die oberen Bindebänder um die Maske abzunehmen. Entsorgen Sie die Maske sofort ordnungsgemäß. Waschen und desinfizieren Sie sich nach dem Gebrauch die Hände. Wenn die Maske feucht wird, tauschen Sie sie sofort aus.

Lagerung: In trockener Umgebung und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in der Originalverpackung lagern, siehe auch Verpackung.