

Produkt:	ubiQ ³ ®	 
REF:	273/M 273/L	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	KAT III nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.
Schutzklasse:	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP3 NR D nach EN 149:2001+A1:2009. Sehr gute Hautverträglichkeit wissenschaftlich belegt durch Prüfungen nach EN ISO 10993-5 (Zytotoxizität), EN ISO 10993-10 (Sensibilisierung) und EN ISO 10993-23 (Irritation): Die verwendeten Materialien sind nicht zytotoxisch, nicht sensibilisierend und nicht irritierend. Entspricht zusätzlich den Anforderungen für Typ IIR medizinische Gesichtsmasken nach EN 14683:2019+AC:2019 im Bezug auf Filterwirksamkeit für Bakterien, Spritzerfestigkeitsdruck und Mikrobiologische Reinheit.
Materialien:	▪ Maske: Vliesstoff aus Polypropylen ▪ Filtermedium: Polypropylen Mikrofaser ▪ Nasenbügel: mit Plastik ummantelter Metalldraht ▪ Kopfband: Textiles elastisches Band, frei von Naturlatex
Produktbeschreibung:	Die Atemschutzmaske ubiQ³® bietet sicheren Schutz gegen Stäube, Aerosole und nicht flüchtige, flüssige Partikel. Ausgestattet mit einem HochleistungsfILTER gewährleistet die Atemschutzmaske ubiQ³® hohe Filterleistung bei sensationell geringem Atemwiderstand und bringt somit ein Höchstmaß an Sicherheit für den Anwender mit sich. Die "Duckbill"-Form sorgt für eine einfache Handhabung und ermöglicht zudem eine platzsparende Lagerung und praktische Mitnahme. Der Nasenbügel lässt sich einfach an die individuelle Nasenform anpassen und macht die Maske detektierbar. Maximaler Schutz auch unter extremen Bedingungen: für Einwegmasken freiwilliger Dolomitstaub-Einspeichertest bestanden!

Produktleistungen:	Produktperformance nach EN 149:2001+A1:2009
---------------------------	---

Filtereffizienz						
Klasse	Anforderung			Testresultat		
	Maximaler Durchlass			Tatsächlicher Durchlass		
	NaCl 95 l/ min	Paraffinöl 95 l/min		NaCl 95 l/ min	Paraffinöl 95 l/min	
FFP3 NR D	1 %	1 %		0,2 %	0,5 %	
Atemwiderstand						
Klasse	Anforderung			Testresultat		
	Maximaler Atemwiderstand (mbar)			Tatsächlicher Atemwiderstand (mbar)		
	Einatmung		Ausatmung	Einatmung		Ausatmung
	30 l/min	95 l/min	160 l/min	30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP3 NR D	1,0	3,0	3,0	0,2	0,5	1,1
Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft						
Klasse	Anforderung (max.)			Testresultat		
FFP3 NR D	1 %			0,3 %		
Produktperformance nach EN 14683:2019 +AC:2019						
Bakterielle Filterleistung (BFE)						
Klasse	Anforderung			Testresultat		
Typ IIR	≥98 %			>99,7 %		
Druck des Spritzwiderstandes						
Klasse	Anforderung			Testresultat		
Typ IIR	≥16,0 kPA			16,0 kPA		
Mikrobiologische Reinheit						
Klasse	Anforderung			Testresultat		
Typ IIR	Maximaler KBE/g Wert			tatsächlicher KBE/g Wert		

		< 30	≤ 8
*KBE = Kolonie bildende Einheiten.			

Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Box	50 Stk.
	Karton	900 Stk.
GTIN:	273/M	4049825006145
	273/L	4049825006138
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern (siehe Verpackung). Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt).	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	