

# DACH *Eco Shield*




## BAUANLEITUNG


---



1. Schieben Sie die Enden des Rahmens jeweils in die innenliegenden Löcher der Sichtscheibe.

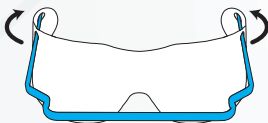

2. Klappen Sie die Seiten der Sichtscheibe nach innen und führen die Enden des Rahmens jeweils durch die äußeren Löcher der Scheibe.

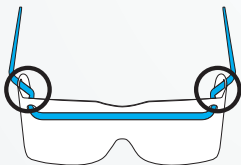

3. Schieben Sie die Sichtscheibe bis ganz nach vorne an den Rahmen. Die Scheibe arretiert in den Ausbuchtungen des Rahmens und kann nun verwendet werden.



DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

E-Mail: [info@dach-germany.de](mailto:info@dach-germany.de)

Web: [www.dach-germany.de](http://www.dach-germany.de)

# DACH *Eco Shield*




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


---



1. Slide frame through inside holes on lens. The rounded side of the frame should face downward.

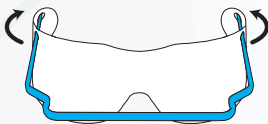

2. Roll the ends of the lens inward and slide frame through outside holes on lens.

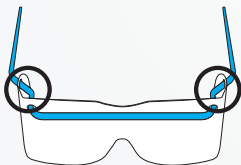

3. Slide lens forward until it locks in place at the notch on frame.



DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

E-Mail: [info@dach-germany.de](mailto:info@dach-germany.de)

Web: [www.dach-germany.de](http://www.dach-germany.de)